



ネコザベスカラーについて

nekozabethancollar

本製品は、飼い主さんのご要望をお聞きして症状を改善する目的で製作しておりますが、完治や改善を保証するものではありません。使用前・使用中はかかりつけ医にご相談ください。

★はじめは首回りゆったりから★

★自分でカキカキできない所はサポートを★

★症状が安定している時は外してリフレッシュタイムを★

<使い方>

- ・ ゴムを調整してから、装着してください。
- ・ ゴムが外に出ていると脚や周りの物に引っかかり危険ですので必ずカラーの中にゴムをすべて入れてください。

※ 個体差があるので、同じサイズのカラーを使用していてもカバーできる場合と、カバーできない場合があります。

<対象>

猫・小型犬・中型動物

<目的>

手術後ケア（去勢・避妊等）、皮膚病ケア、傷舐め防止、介護等

<特徴>

頭からスポンと入れて装着、防水、超軽量、超ソフト、着脱簡単、首回り調整可能


<素材>

ナイロン、ゴムひも、PP（シート入りのみ）

<サイズ>

標準	内径	幅	重さ
S	6 cm以下	10cm 以下	
M	6～7 cm	10cm	15g 17g(シート有)
L	6～7 cm	15cm	20g 25g(シート有)

※1つ1つ手作業で制作している為、サイズや形状に若干の差が出てしまう場合がございます。
上記はおおよその数値です。

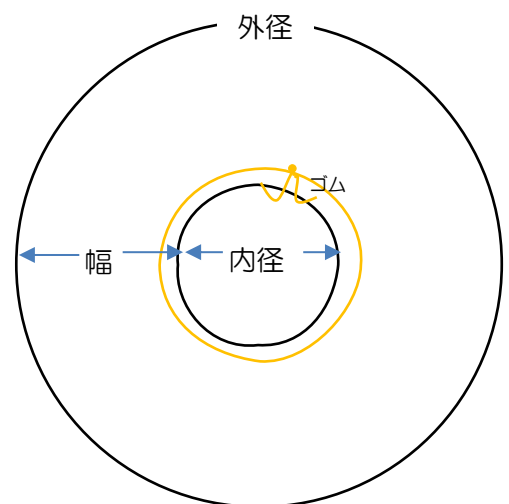

<ゴムについて>

ゴムの種類、長さ調整により

- ・伸縮の感覚
- ・猫さんの付け心地感
- ・飼い主側の装着脱のしやすさ 等

が異なります。標準のゴムは 4 コールを使用しております。より外れにくくされたい場合は、6 コール以上のゴムに入れ替えてください。

<注意事項>

装着している間は、行動や首回りにトラブルが起きていないか小まめに観察をお願いいたします。問題が起きた場合はご使用を中止してください。

着用により事故が発生しても責任は負いかねます。

素材によって肌に合わない場合があります。

きつく締めすぎると、気分が悪くなる場合があります。

逆に首回りが緩すぎると、足が顔とエリザベスカラーの間に入り危険な場合があります。安全を確認しながら、内径の調節（ゴム）をお願いいたします。

<ご感想>

- ★水や汚れを弾くので、いつも清潔
- ★傷を守りつつ 体をお掃除できる
- ★ストレスが少ない
- ★タワーに登れる
- ★餌も食べやすい
- ★う◯ちもしやすい
- ★お腹を出して寝られる

※すべての猫さんに当てはまるわけではありません。

<お問合せ>



kozakuranran.jp



『ネコザベスカラー』は登録商標です。

2024 年 2 月