



トリザベスカラーについて

torizabethancollar

本製品は、鳥の毛引き、自咬などの症状を改善する目的で製作しておりますが、完治や改善を保証するものではありません。使用前・使用中はかかりつけ医にご相談ください。

★はじめは首回りゆったりから★

★自分でカキカキできない所はサポートを★

★症状が安定している時は外してリフレッシュタイムを★

<使い方>

- ・ゴムを調整してから、装着してください。
 - ・ゴムが外に出ていると脚や周りの物に引っかかり危険なので必ずカラーの中にゴムをすべて入れてください。
 - ・複数を重ねて使うことは推奨していません。
 - ・エリザベスカラーは消耗品です。体を傷つけないように身代わりになってくれているものですので、消耗が激しく危険な場合は、新しいものに取り換えてください。
- ※個体差があるので、破壊により数日で使えなくなる場合もあれば、一年以上使われている事例もございます。


<特徴> 防水、着脱簡単、首回り調整可能

<素材> ナイロン、平ゴム、PPシート

<サイズ> 鳥さんの種類（小型、中型、大型）だけではなく、毛引きや自咬場所も考慮に入れてサイズをお選びください。

個体差（体格・性格）、体の柔らかさ、賢さ（常に知恵比べ）、経験 等も関係します。

サイズ	幅(首～裾)	外径
プチ	約 2 cm	約 17 cm
S	約 3.5 cm	約 21 cm
MS	約 4 cm	約 24 cm
M	約 4.5 cm	約 28 cm
LM	約 5 cm	約 32 cm
L	約 6 cm	約 36 cm
ダブル A	標準：約 8 cm×約 8 cm、同比率サイズ有	
ダブル B	標準：約 8.5 cm×約 5.5 cm～、同比率サイズ有	
PLUS 筒型	上部 筒（約 2 cm） 下部 S～L	

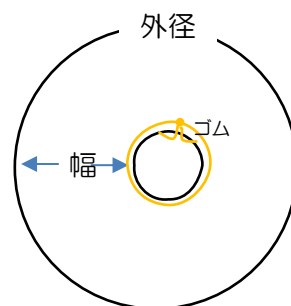

※手作業で制作しておりますので誤差はお許しください。

<ゴムについて>

ゴムの種類、長さ調整により

・伸縮の感覚 ・鳥さんの付け心地感（抵抗の仕方が違います）・飼い主側の装着脱のしやすさ 等が異なります。

同じ種類の鳥さんで、同じゴムを使用したとしても個体差によってすぐに外してしまったり、外されなかったりします。

<注意事項>

- ・装着している間は、餌や水が食べられるか、行動や首回りにトラブルが起きていないか毎日小まめに観察をお願いいたします。問題が起きた場合はご使用を中止してください。
- ・着用により事故が発生しても責任は負いかねます。
- ・肌に合わず腫れたり、出血したりする場合があります。
- ・エリザベスカラーをつけることによって、首が気になったり、かゆくなったり、口ばしが届く場所が集中することによって、今まで毛引きや自咬行為をしなかった場所にトラブルが起きる可能性があります。
- ・長期間使用したり、鳥さんが引っ張ったりすると首に負担がかかる為、毛ズレを起こす可能性が高いです。（きつく締めすぎたり、太いゴムを利用したり、体に対してエリザベスカラーが大きいと肌に触れる範囲が広がります）

<初めての方>

最初はショックで落ち込んでしまう、あるいはパニックを起こしたように暴れる可能性が高く、バランスが取れるようになるまでふらふらするかもしれません。個体差によりますが、疲れて諦めてくると慣れて落ちていくと思います（一晩～数日）。

慣れるまでは

- ・落鳥防止のため 止まり木を外す
- ・餌（水）が食べにくい場合は 床に置く
- ・放鳥時には怪我の無いよう よく観察

するようにお願いいたします。

また、パニックを緩和するために

- ・数日間、ゲージ上などの見える場所に置き見慣れてもらう
 - ・暴れたら落ち着くまで抱っこ、マッサージ、優しく話しかける
- という対策もあります。

<使用例紹介>

Youtube では、使用例を掲載しております。また「一次情報に繋がりやすいように」Instagram や X でも写真や動画をリツイートやメンション等しながら紹介させて頂いております。サイズ選びやメリット・デメリットなどの参考になればということで、ご協力いただいているユーザー様に感謝いたします。

<お問合せ>



kozakuranran.jp

『トリザベスカラー』は登録商標です。

2024年2月