

飼い主様の声



こんなの求めてた！が全て詰まった素晴らしい商品です！
自咬癖が出るたび、病院でもらったシリコンのエリカラを着けていましたが、折り曲げたり、縁を齧ったりで意味がなくなって来たなあ ... いいのいいかなあ ... って探していた時にこちらを見つけました！



鳥専門病院で勧められただけです。



被せるだけなので鳥にも人間にも優しくとても満足しています。
あと可愛いです！



我が家のマメルリハは色々試した中で
1番落ち着いて過ごしているような気がします



前回 MS サイズを購入、うちのコザクラちゃん、
お尻まわりと尾脂腺あたりを噛んでいたのですが、
着け始めて1ヶ月、かなり肌がキレイになりました！



【注意事項】ご注文前に必ずお読み下さい！

- 装着している間は、餌や水が食べられるか、行動や首回りにトラブルが起きていないか毎日小まめに観察をお願いいたします。
問題が起きた場合はご使用を中止してください。
- 肌に合わず腫れたり、出血したりする場合があります。
- トリザベスカラー®をつけることによって、首が気になったり、かゆくなったり、くちばしが届く場所が集中することによって、今まで毛引きや自咬行為をしなかった場所にトラブルが起きる可能性があります。
- 長期間使用したり、鳥さんが引っ張ったりすると首に負担がかかる為、毛ズレを起こす可能性が高くなります。（きつく締めすぎたり、太いゴムを利用したり、体に対してトリザベスカラー®が大きいと肌に触れる範囲が広がります）
- トリザベスカラー®を複数枚重ねて使うことは推奨しておりません。
- トリザベスカラー®は消耗品です。体を傷つけないように身代わりになってくれているものですので、消耗が激しく危険な場合は、新しいものに取り換えてください。※個体差があり、破壊により数日で使えなくなる場合もあれば、一年以上使われている事例もあります。

問題が起きた場合は、直ちにご使用を中止してください。
装着により事故が発生しても責任は負いかねます。



オンラインショップ

<https://kozakuranran.jp>

海外発送も可能

お気軽にお問い合わせください

support@kozakuranran.jp



ペットの為に エリザベスカラー工房

★コザクララン★

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号5F

©2024年9月改定版

トリザベスカラー®

毛引症・自咬症・発情 対策

傷口保護

エリザベスカラー生活を
楽に！可愛く！



ペット&飼い主様&コザクラランの3人4脚でクリエイト
ペットを取り巻く社会環境から病気を考える

コザクララン★

kozakuranran
ペットの為にエリザベスカラー工房



事例① ベーシックタイプ

病院ではクリアファイルをドーナツ状に切り抜き、エリザベスカラーを作成しているところが多い。首回りをテープで補強すると、体に食い込み負担がかかりやすい。鳥にとっても自由が利かなくなり、食事がしづらく、ストレスが強い。トリザベスカラー® はやわらか素材でストレスが軽減し毛も回復。



事例② タートルネックタイプ

様々なエリザベスカラー（病院処方・市販品・手作り）を試したが、手の施しようがなくなり、「トリザベスカラー® 着用前」の写真のようになるまで毛引きが悪化。着用後は、毛の再生が進み問題ないほど回復。



※パンフレット掲載写真は飼い主様からご提供頂きSNSで紹介させて頂いているものです。（事例の詳細はSNSを参照ください）

ベーシックタイプ

＜素材＞ナイロン・平ゴム・シート（PP）



サイズ	フチ	S	MS	M	LM	L
直径	5.5cm	7cm	8cm	9cm	11cm	12cm
長さ	2cm	3.5cm	4cm	4.5cm	5cm	6cm
鳥さんの種類	セキセイインコ					
	コザクラインコ・ボタンインコ					
	オカメインコ					
			中型インコ以上(オキナ・シロハラ)			

※「鳥さんの種類」欄には代表的なインコを例に挙げています。サイズ選びの際は愛鳥さんに近い大きさのインコを参考になさってください。※数値はおおよその値です。※一つひとつ手作業で製作しているため、寸法や形状に若干の差が出てしまう場合がございます。


その他のタイプ(オーダー可能)

＜素材＞ナイロン・平ゴム・シート（PP）

こちらの表の寸法はあくまでも標準型の例です。（鳥さんに合わせたカスタムオーダーが可能です。）


ダブルA（標準型寸法）

お尻や足などの体の下部をカバー

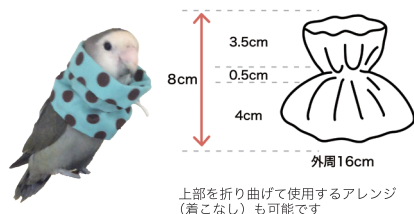


ダブルB（標準型寸法）

首回りカバー（ゆったり）

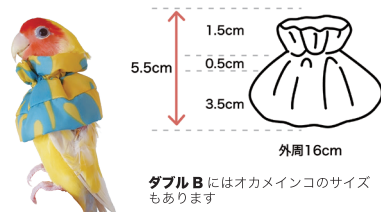

タートルネック付き（標準型寸法）

首回りカバー（しっかり）ベーシックとタートルネックを組み合わせたもの。

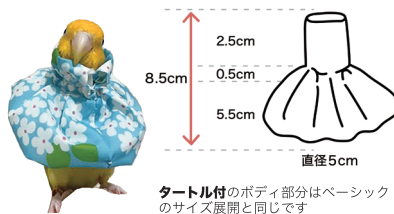

サイズ選びについて

- 鳥さんの種類（小型、中型、大型）だけではなく、毛引きや自咬場所も考慮に入れてサイズをお選びください。
- 個体差（体格・性格）、体の柔らかさ、賢さ（常に知恵比べ）使用経験等も関係します。
- 慣れるまでは「フチサイズ」で練習がお勧めです。

初めての使用について

- 最初はショックで落ち込んでしまう、あるいはパニックを起こしたように暴れる可能性が高く、バランスが取れるようになるまでふらふらするかもしれません。
- 個体差によりですが、疲れて諦めてくると慣れて落ち着いてくる傾向にあります（一晩～数日）。

慣れるまで飼い主にしていただきたいこと

- 落鳥防止のため止まり木を外す。
- 餌（水）が食べにくい場合は床に置く。
- 放鳥時には怪我の無いよう、よく観察。
- パニックを緩和するために数日間、ゲージ上などの見える場所にトリザベスカラー®を置き、見慣れてもらう。
- 暴れたら落ち着くまで抱っこ、マッサージ、優しく話しかける。