



フクモモザベスカラーについて

fukumomozabethancollar



本製品は、フクロモモンガの自咬などの症状を改善する目的で製作しておりますが、完治や改善を保証するものではありません。使用前・使用中はかかりつけ医にご相談ください。

<装着中の前提条件>

エリザベスカラーつけた状態で、手に物を持って食べることはできません。
直接口を器につけて食べられるようになる必要があります。

★はじめは首回りゆったりから★

★自分でカキカキできない所はサポートを★

★症状が安定している時は外してリフレッシュタイムを★

<使い方>

- ・ゴムを調整してから、装着してください。
 - ・ゴムが外に出ていると脚や周りの物に引っかかり危険なのでカラーの中にゴムをすべて入れてください。
 - ・ビニール面を身体側になるようにして装着してください。
 - ・エリザベスカラーは消耗品です。体を傷つけないように身代わりになってくれているものです。消耗が激しく危険な場合は、新しいものに取り換えてください。
- ※個体差があるので、同じサイズのカラーを使用してもカバーできる場合と、できない場合があります。

【装着のコツ】

大好物を穴の向こう側にセッティングすると、それを目掛けてシュッと自ずと首を突っ込んでくれる。

【取外しのコツ】


前後を斜めにするとう取外ししやすい。

<仕様>

<特徴> 軽量・防水・柔らか素材、首回り調整可能

<素材> ナイロン、平ゴム、ビニール

<サイズ> 内径 約 2.5cm、幅 約 3.5~4cm、
平ゴム 8 コール

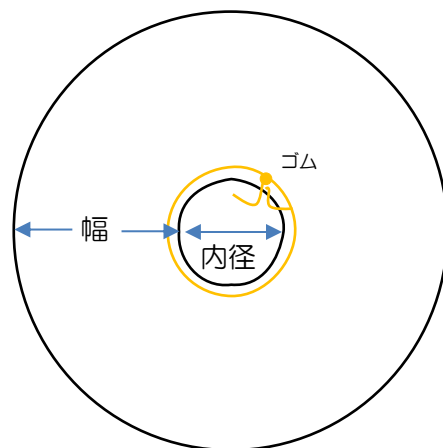

※手作業で制作しておりますので誤差はお許しください。

<注意事項>

- ・ 装着している間は、餌や水が食べられるか、行動や首回りにトラブルが起きていないか毎日小まめに観察をお願いいたします。問題が起きた場合はご使用を中止してください。
- ・ 着用により事故が発生しても責任は負いかねます。
- ・ 肌に合わず腫れたり、出血したりする場合があります。
- ・ エリザベスカラーをつけることによって、首が気になったり、かゆくなったり、口や手足が届く場所が限られてくるので、今まで自咬行為をしなかった場所にトラブルが起きる可能性があります。
- ・ 長期間使用すると、毛ズレを起こす可能性が高いです。

<お問合せ>



kozakuranran.jp

2024年4月