



ハムザベスカラーについて

hamuzabethancollar

本製品は、このエリザベスカラーは、獣医さんに監修頂いて制作いたしましたが、改善を保証するものではありません。

・着脱は獣医さんにして頂いてください。素人が調整すると危険です。

<使い方>

- ・首回りに負担がないか、外れにくいかな等の安全を確認しながら、内径の調節（巻きつける）をし、ホッチキスやテープなどで固定します。
 - ・エリザベスカラーは消耗品です。体を傷つけないように身代わりになってくれているものです。消耗が激しく危険な場合は、新しいものに取り換えてください。
- ※個体差があるので、同じサイズのカラーを使用していてもカバーできる場合と、できない場合があります。

★エリザベスカラー装着中★



★エリザベスカラー生活終了★



<仕様>

<特徴> 軽量・防水・首回りソフト

<素材> PPシート、ナイロン

<サイズ>

★ジャンガリアンハムスター用

内径 約 2cm

幅 約 3cm

首回り布幅 約 5mm(黄色い部分)

直径 約 8cm


★キングマハムスター用

内径 約 2.5cm

幅 約 3cm

首回り布幅 約 5mm(黄色い部分)

直径 約 8.5cm

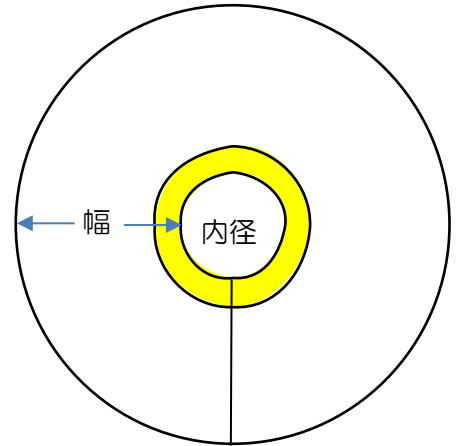

※手作業で制作しておりますので誤差はお許してください。
オーダーメイドサイズでのご注文も可能です。

<注意事項>

- ・ 装着している間は、餌や水が食べられるか、行動や首回りにトラブルが起きていないか毎日小まめに観察をお願いいたします。問題が起きた場合はご使用を中止してください。
- ・ 着用により事故が発生しても責任は負いかねます。
- ・ 肌に合わず腫れたり、出血したりする場合があります。
- ・ エリザベスカラーをつけることによって、首が気になったり、かゆくなったり、口や手足が届く場所が限られてくるので、今まで自咬行為をしなかった場所にトラブルが起きる可能性があります。
- ・ 長期間使用すると、毛ズレを起こす可能性が高いです。

<お問合せ>



kozakuranran.jp

2024年4月